



**Primedical**  
Prime medical equipment. Prime service.

Общество с ограниченной ответственностью

## «Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: [info@primedical.by](mailto:info@primedical.by), тел. +375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:  
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980986, ОКПО 501156715000

г. Минск, 22.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский клинический  
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

### Заключение о техническом состоянии оборудования «Olympus»

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация видеогастроскопа  
GIF-HQ190 зав. № 2746911 *инв. № 01378502*.

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- использование низкокачественных, неоригинальных комплектующих в предыдущих ремонтах;
- незначительный люфт рукояток;
- общий механический износ;
- затруднена проходимость инструментального канала при максимальных углах изгиба.

**Аппарат пригоден к эксплуатации, при условии сохранения герметичности.**

**Рекомендуем: проведение капитального ремонта, с заменой запасных частей, расходных материалов: А-резина, инструментальный канал, изгибаемый отдел, рубашка рабочей части.**

Начальник сервисного отдела

Е.В. Александрович



*Нач. отдела* *А. П. Рогов*

