



АДВИН

Закрытое Акционерное Общество «АДВИН»
Смарт Фэктори»
ул. Селицкого 7, 220075, Минск
Тел./Факс: +375 (17) 349 0000
E-mail: info@advin-group.com
Сектор сервисного обслуживания:
+375 (17) 349 00 55

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ № 113434 от 25.02.2026 г. с техническим актом № от		Гарантийное оборудование ☐	Гарантийное обслуживание ☐
		Постгарантийное оборудование ☒	Негарантийное обслуживание ☐
Настоящий акт составлен в том, что согласно уведомлению вх № 01-07/278 от 06.01.2026г.			
ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» в период с 25.02.2026 г. по 25.02.2026 г.			
на основании договора № 25-26Б от 10.02.2026г. проведено:			
1. Вид работ:	диагностика ☒	ремонт ☐	ТО-1 ☐
2. Информация об оборудовании:		Униэксперт 3 плюс (вид, модель)	
Заказчик: (наименование)		УЗ «Жодинская центральная городская больница»	
Место оказания услуг: (город, страна)		г. Жодино, пр-т Венисье, д.1	
Состояние на момент уведомления:		работоспособное ☒	неисправное ☐
Простой оборудования: 0 дней		Наработка оборудования: 112365/14956 экспозиций/иссл.	
Характер неисправности (по уведомлению):		Диагностика неисправностей аппарата рентгенодиагностического «Униэксперт 3 плюс» №101	
4. Оказанные услуги:		Выполнены работы по Договору №25-26Б от 10.02.2026г. 1. Не перемещается дека стола-штатива наклонного IMX-7 в поперечном направлении из-за механического повреждения направляющей в области подставки для ног. 2. Устаревшая 32- разрядная ОС, сбои в работе ОС Windows 7, невозможно обновить версию ПО АРМ врача-рентгенолога до актуальной (рекомендуется замена АРМ врача-рентгенолога, с восстановлением имеющейся базы данных р/изображений) 3. Архивный сервер PacsOne не соединяется с NAS, требуется его переустановка, с последующим переносом архивных снимков в новую базу.	
5.Идентификация неисправных комплектующих/ узлов/ версии ПО:		2-1-2-4 Механизм поперечного перемещения дека стола-штатива наклонного IMX-7 3-2 АРМ врача-рентгенолога	
6. Причина неисправности:		Механическое повреждение направляющей механизма поперечного перемещения дека стола Сбои в работе ОС Windows 7, невозможно обновить версию ПО АРМ врача-рентгенолога до актуальной	
7. Использованы комплектующие/запасные части /материалы: (с указанием кол-ва)			
8. Затрачено времени: ч/часов		Зона выезда:	В-2-2
9. УСЛУГИ ОКАЗАНЫ. К качеству и срокам проведения работ у Заказчика претензий нет. ☐ После оказания услуг по ремонту оборудования проверено и признано пригодным для дальнейшей эксплуатации. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет () месяца (ев) с даты подписания технического акта ☐ После оказания услуг по диагностике неисправностей установлены причины неисправностей и/или перечень необходимых для ремонта запасных частей/комплектующих ☐ После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования оно проверено и признано пригодным для дальнейшей эксплуатации.			
УСЛУГИ НЕ ОКАЗАНЫ. Характер неисправности не позволяет оказать услугу по диагностике/ремонту на месте эксплуатации оборудования или завершить работы по причине:			
Нижеперечисленные комплектующие/запасные части изъяты для диагностики/ремонта			

10. Пожелания Заказчика/
Дополнительная информация

Представитель заказчика:

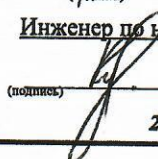

(подпись)
МП
25.02.2026

Представитель сервисной службы:

Вед. инженер по наладке и испытаниям
(должность)

 /Матюш А.И./
(подпись) (Ф.И.О.)

Инженер по наладке и испытаниям
(должность)

 /Кулешов Ю.М./
(подпись) (Ф.И.О.)

25.02.2026

Начальник сектора сервисного
обслуживания

_____/Соколовский М.В./
(подпись)

МП

_____. _____. 2026 г.