

Частное производственное унитарное предприятие «Азгар-ФТО»

Для писем: 220018 г. Минск, ул. Шаранговича, д.19, каб.630

Юридический адрес: 223015, Минская обл., Минский район, а.г.Семково, ул.Озерная, д.9, кв.1, УНП 691760705

Р/сч: IBAN: BY17PJCB30120339531000000933

код банка (BIC) PJCBVY2X в "Приорбанк" ОАО

ЦБУ 115, г. Минск, ул. Кропоткина, 91

Отдел продаж: тел (+37517)3655050, (44)511-888-2

Тех. Отдел: тел (+37517)3050500, (29)152-68-48

azgar-fto@mail.ru Сайт: azgarfto.by или



г. Минск

06.07.2026

Акт дефектности № 06/07-26

Настоящий акт составлен по результатам технического осмотра и диагностики аппарата для местной дарсонвализации ИСКРА-М с заводским номером 059, 2023 года выпуска. Осмотр проведен с целью оценки текущего технического состояния оборудования, выявления неисправностей, влияющих на качество и безопасность работы, а также определения возможности дальнейшей эксплуатации и ремонта данных аппаратов.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заместитель директора Бондаровец Дмитрий Геннадьевич;

Члены комиссии-, гл. инженер Пономарев Сергей Викторович, техник Микулич Кирилл

Святославович, составили настоящий Акт о выявленных неисправностях:

№	Наименование аппарата	Зав.№	Год выпуска	Мероприятие	Результат
1	Аппарат для местной дарсонвализации ИСКРА-М	059	2023	Технический осмотр, диагностика	Выявлена неисправность Платы управления.

Заключение и рекомендации

Для восстановления работоспособности медицинской техники, с учетом выявленных дефектов и анализа технического состояния аппарата местной дарсонвализации ИСКРА-М с заводским номером № 059 требуется произвести ремонт Платы управления.

При работе аппарата не рекомендуется зажженным электродом близко подносить и прикасаться к панели управления, а также проводить настройку тока аппарата держа резонатор и ручку настройки одновременной одной рукой т.к. высокое переменное электрическое поле ионизированного электрода наведенными вихревыми токами может вывести из строя низковольтный контроллер платы управления. Дополнительно рекомендуется проверить качество заземления на заземляющих контактах в розетке питания аппарата. Если заземление отсутствует, необходимо для устойчивой работы аппарата подключить заземляющую шину к гнезду заземления.

Рекомендовано провести инструктаж медицинского персонала по данному факту.

Председатель комиссии зам.директора

Члены комиссии: гл. инженер

техник



Начальник П

Сергей С.А.

Кирилл