

ОТЧЕТ				
Дата:	16.06.2026			
Контракт / Договор				
Учреждение	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», пр.Независимости, 64, г.Минск, 220013			
Оборудование	МРТ «Optima MR450w GEM», GE Healthcare			
Серийный номер	HM1019			
Состояние оборудования перед началом работ:	см. отчет от 28.04.2026			
☐ Неисправное ☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Регламентные работы при замене и вводе в эксплуатацию головы охлаждения паров гелия (Cold Head ASM, RDE-412A4, Serial: 38A19711A) магнитно – резонансного компьютерного томографа Optima MR450w GEM производства компании GE Medical Systems LLC, США. Демонтированная голова охлаждения передана заказчику. На момент окончания работ давление гелия в магните: 1.953 psi и продолжает снижаться. Система сконфигурирована на рабочее давление 0.90 - 1.10 psi. Уровень гелия 80.33%, давление гелия в компрессоре Sumitomo F-50H 2.0 MPa. Фильтр паров гелия отработал 25500 часов при норме 30000. С учетом установки новой головы охлаждения рекомендуется провести его быструю замену. С ошибкой работает датчик контроля кислорода. Физический износ, рекомендуется замена на новый.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
1	Голова охлаждения паров гелия (Cold Head ASM).	☐	☒	1 шт.
		☐	☐	
Необходимые запчасти				Кол-во
№ п/п	Описание детали			
1	Adsorber Sumitomo (фильтр паров гелия в компрессор)			1 шт.
2	Датчик содержания кислорода (Cell Ambient)			1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:		Комментарии:		
☐ Неисправное ☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, Должность	Романчук Д.Г., ведущий инженер	ФИО, Должность	Белок Д.А. инженер МРТ	
Подпись	Корниевич Е.С., инженер 1-й категории	Подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг «Традинтек сервис»
 220004, Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 518 В, 518 Г, 518 Д.
 Тел. + 375 17 200 03 09. Факс. +375 17 200 03 11
 E-mail: admin@tradintekservice.com